

사용자 설명서

품 목 명 : 의료용절삭기구

수입품목신고번호 : 수신 19-2585 호

상 품 명 : VERDENT Dental Burrs

제조사/소재지/국가 : Verdent LTD.(폴란드,38/52 Czystochowska Str. 93-121 Lodz, Poland)

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

천자기, 천공기 및 핸드피스 등에 사용하는 절삭용 버(burr), 절삭용 디스크, 광택용 휠, 스트립 등의 기구. 레이저, 수술기용 디스크를 포함한다

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용전 시범 작동하여 이상이 없는지 확인한다.

2. 조작방법

- ① 사용하고자 용도에 맞는 버와 호환 가능한 핸드피스를 선택한다.
- ② 안전한 사용을 위하여 버를 핸드피스에 견고히 체결한다.
- ③ 핸드피스를 구동하여 절삭하고자 하는 부위를 다듬는다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 삭제날이 시술에 사용하기 어려울 정도로 무뎠지기 전까지 재사용이 가능하다.
- ② 사용후 즉시 혈액이나 이물질이 건조되지 않도록 물 또는 세척액에 담근 뒤 초음파 세척기로 세척후 완전히 건조시킨다.
- ③ 세척 및 건조된 버를 오토클레이브 멸균한다. (습열멸균)
 - 멸균 조건: 134°C, 5분 이상
 - 멸균후 건조시간: 10분 이상
- ④ 멸균후 멸균상태를 유지하기 위하여 멸균봉투에 실링하여 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전에 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 파절 방지를 위하여 무리한 힘을 가하지 않는다.
- ③ 열발생을 줄이기 위하여 사용시 충분한 양의 물을 함께 사용한다.
- ④ 손상되거나 사용하기 어려울 정도로 무뎠진 경우 사용을 중지한다.
- ⑤ 회전식 기구를 작동시킬 때 보호경 등의 적절한 개인 보호구를 착용한다.
- ⑥ 러버댐 사용을 권장한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2019년 10월